

安疼舒痛環  
ActiPatch

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用  
型號:077、088

衛部醫器輸字第 032887 號

■ 產品敘述

本產品內含可控制的電子裝置，被設計應用於身體，以低於患者的熱感覺閾值，發射短時、脈衝、射頻能量(脈衝電磁場 PEMF)。

■ 適應症

由電池供電的可攜式產品，以電磁場 (EM) 作用於身體深層組織，幫助減少與肌肉骨骼或神經系統相關疾病的疼痛。

■ 禁忌症

1. 配戴心律調節器、植入式心律除顫器、深層腦部刺激器和神經刺激器或其他植入的金屬或電子醫療器材時，請勿使用
2. 當感受到突然並無法解釋的疼痛時，請勿使用。突然且不明原因的疼痛可能是嚴重疾病的前兆，需要立即就醫
3. 當不清楚肌肉骨骼疼痛成因時請勿使用。請先諮詢醫生，以了解有關疼痛形成原因的更多資訊
4. 勿使用於身體深層的疼痛，例如胸腔或腹部疼痛，本產品不適用於治療身體深層的疼痛
5. 不適用於孕婦或是可能懷孕的女性
6. 請勿使用於治療癌症相關的疼痛，本產品不被用於治療癌症相關的疼痛

■ 警告

1. 請在使用本產品前先諮詢醫生。
2. 如果在使用產品 7 天後疼痛沒有改善，請停止使用並諮詢醫生
3. 不是滅菌產品，因此不應與開放性傷口或刺激處有直接接觸
4. 窒息風險：請勿吞入產品

■ 注意事項


1. 機身內部沒有任何可維修的零件，不要嘗試修改或破壞
2. 請勿在淋浴或浴缸中配戴，本產品不防水
3. 請放置於兒童觸及不到的地方
4. 如果 LED 燈不再亮起，代表本產品不再運行，即可根據當地法規丟棄
5. 保持佩戴時舒適性。如果有任何不適，可使用魔鬼氈鬆開包裹物
6. 不適用於 17 歲以下的孩童

## ■ 不良反應

1. 使用情況下如果疼痛持續 3-4 天或惡化，請停止使用並就醫
2. 用於將產品粘貼到皮膚上的粘性醫用膠帶可能會導致皮膚刺激
3. 如果發生皮膚刺激，請使用包裹物、肌能系貼布(kinesiology tape)或將產品配戴在衣服上 確保產品靠近皮膚並且離皮膚不超過 3 毫米(或 1/8 英寸)，因為距離較遠可能會降低效果。如果皮膚刺激沒有消退，請停止使用本產品

## ■ 操作說明

1. 開機: 移除白色背蓋，長按銀色開關鈕 1-2 秒
2. 當產品開啟時，產品正面綠色提示燈會亮起。如果無法亮起請重複步驟 1
3. 關機: 長按銀色開關鈕 1-2 秒，關機時綠色提示燈會一併關閉

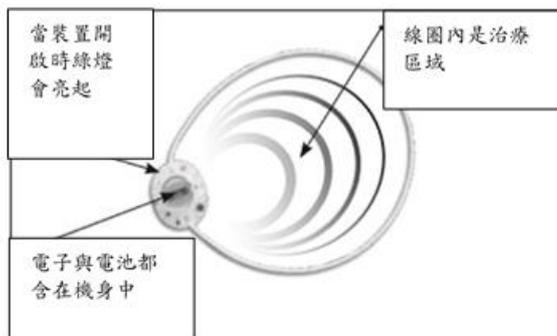

\* 為發揮最好療效:

環狀線圈區域應直接放置於疼痛處，為發揮最佳緩解療效，請持續配戴於相同部位，直至疼痛消失，盡可能地貼近皮膚效果更好，但隔著輕便衣物也可達到治療效果。

可使用任何類型的包裹物、粘劑、繃帶或是衣物來幫助產品固定在疼痛部位

## ■ 型號及規格

### ➤ 型號 077

Item#	適用部位	配件
Item#168	頸部、肩膀、髖部、背部、膝蓋	黏貼條

載波頻率	27.12 MHz
峰值功率密度	73 微瓦/平方公分
脈率	1,000 脈衝/秒
脈衝持續時間	100 微秒
電源	鋰電池-CR1620

天線尺寸	12 cm
治療範圍	103 cm <sup>2</sup>
重量	8 公克
可運作時長	168 小時 (不可關)
儲存環境	溫度: Min 14°C (55 °F) – Max 57 °C (110 °F) 最大濕度: < 75%
操作環境	溫度: Min 14°C (55 °F) – Max 57 °C (110 °F) 最大濕度: < 75% 大氣壓力: <1008 millibar (756 mm of Hg) 使用的最高海拔高度: 2000m

➤ 型號 088

Item#	適用部位	配件
Item#98-4	頸部、肩膀、髖部	黏貼條
Item#90-4	背部	背部繃帶
Item#103-4	膝蓋	膝蓋繃帶

載波頻率	27.12 MHz
峰值功率密度	73 微瓦/平方公分
脈率	1,000 脈衝/秒
脈衝持續時間	100 微秒
電源	鋰電池-CR2032
天線尺寸	12 cm
治療範圍	103 cm <sup>2</sup>
重量	9.5 公克
可運作時長	720 小時 (可開關)
儲存環境	溫度: Min 14°C (55 °F) – Max 57 °C (110 °F) 最大濕度: < 75%
操作環境	溫度: Min 14°C (55 °F) – Max 57 °C (110 °F) 最大濕度: < 75% 大氣壓力: <1008 millibar (756 mm of Hg) 使用的最高海拔高度: 2000m

製造廠名稱：BIOELECTRONICS CORPORATION

製造廠地址：4539 Metropolitan Ct. Frederick, MD 21704, U.S.A.

藥商名稱：艾芙蘿生醫顧問股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品需刊載實際地址)